



г. Москва

"09" января 2019 г.

†

Приложение № 1

Новый подход к протезированию:

- Устройство и принцип работы протеза.
- Дополнительный функционал.
- Дизайн протеза.
- Преимущества.
- Расчет стоимости.
- Варианты оплаты протеза.
- Процедура получения протезно-ортопедического изделия за счет бюджетных средств при оформлении ИПР.
- Получение компенсации за протезирование.

Устройство и принцип работы протеза:

Протез проектируется индивидуально по меркам вашего ребенка и изготавливается с помощью технологий 3D-печати. Корпус протеза выдерживает удары и падения, поэтому его можно не бояться сломать.

Функция схвата осуществляется за счет натяжения тросов, которые связаны с пальцами протеза и фиксируются выше локтя. Натяжение тросов происходит при движении локтевого сустава. Такой принцип работы тренирует и развивает мышцы кисти, держит их в тонусе.

Регулируемая застежка и корпус протеза по размерам руки обеспечивает надежную фиксацию протеза.

Приемная гильза изготавливается индивидуально в день протезирования из гипоаллергенного пластика, она плотно фиксирует кисть в протезе и позволяет комфортно им пользоваться.

Дополнительный функционал:

Каждый наш протез можно дополнить уникальными съемными игровыми насадками. Они расширяют функционал и возможности протеза. Используя дополнительные насадки, легко можно прыгать на скакалке, управлять радиоуправляемой моделью, осветить путь домой поздней ночью, снимать видео на закрепленную камеру и многое другое, а теперь даже играть в AR - игры!

С AR-насадкой протез становится игровым джойстиком для игр в дополненной реальности. Теперь детям с такой насадкой доступны развивающие игры, в том числе аналог мафдонга, в которой нужно найти пару своему герою как можно быстрее. Игра развивает память и реакцию, что немаловажно для ребенка.

Геймификация протезов позволяет маленьким киборгам быстрее пройти все этапы социализации, не говоря о том, что это невероятно расширяет функционал протеза.

Дизайн протеза:

Одна из особенностей наших протезов является возможность сделать свой уникальный и яркий дизайн. После изготовления протеза маленький пользователь должен привыкнуть к новому гаджету и научиться практически заново взаимодействовать с окружающим его миром. Индивидуальный дизайн помогает не бояться перемен, вовлечь ребенка в процесс и относиться к происходящему как к игре.

Преимущества:

1. Протезы «КИБИ» дают возможность выполнять основные бытовые действия;
2. Необычный дизайн: Индивидуальный и яркий дизайн протеза проектируется и создается вместе с вами
3. Супер-способность: Расширьте возможности протеза с дополнительными насадками. Превратите протез в настоящий гаджет!
4. Всегда в тонусе! Протез тренирует и развивает мышцы, не дает им атрофироваться
5. Отличный помощник в быту: Позволяет выполнять множество повседневных бытовых действий
6. Вес имеет значение: Небольшой вес нашего протеза позволяет использовать его весь день
7. Тяжелые предметы: Поднятие предметов весом от 1 до 10 кг в зависимости от типа схвата
8. Сломали? Не страшно! Бесплатный гарантийный ремонт и обслуживание протеза 365 + дней в России

лет стоимости:

Активный протез предплечья, Стоимость: от 195 000 руб. Страна производства: Россия

Активный протез кисти, Стоимость: от 135 000 руб. Страна производства: Россия

Варианты оплаты протеза:

1. Оплата собственными средствами с последующей компенсацией стоимости через Фонд социального страхования. (Самый простой и быстрый вариант).
2. Получение протеза по государственному конкурсу. Срок реализации до 6 месяцев. (Есть риск получить протез другого производителя).
3. Бесплатно по инвалидности: компенсация за протез от ФСС. (Протезирование в вашем городе!).

Мы будем сопровождать Вас на всех этапах протезирования, начиная от сбора документов и заканчивая гарантийным обслуживанием протеза!

Процедура получения протезно-ортопедического изделия за счет бюджетных средств при оформлении ИПР:

Шаг 1

Обращение к производителю протезно-ортопедических изделий за консультацией и проведением Медико-технической комиссии с выдачей медико-технического заключения (МТЗ) и назначением рекомендованного изделия.

Шаг 2

Обращение в лечебно-профилактическое учреждение по месту жительства для оформления формы 088/у-06 «Направление на медико-социальную экспертизу организацией, оказывающей лечебно- профилактическую помощь».

Шаг 3

Обращение в службу медико-социальной экспертизы (бюро МСЭ) по месту жительства для установления группы инвалидности и разработки Индивидуальной программы реабилитации (ИПР).

Шаг 4

Обращение к производителю протезно-ортопедических изделий за оказанием услуги.

Важно знать!

Ремонт наших активных и бионических протезов осуществляется бесплатно. В период гарантийного срока — за счет предприятия-поставщика, после — за счет Фонда социального страхования.

Полный текст правил обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации описан в Постановлении Правительства РФ от 07.04.2008г. №240 «О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных), протезно-ортопедическими изделиями».

Получение компенсации за протезирование:

Согласно действующему российскому законодательству все категории инвалидов, при наличии ИПР (индивидуальной программы реабилитации), имеют право на бесплатное протезирование, то есть обеспечение техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями, повышающими уровень их независимости в повседневной жизни.

В случае самостоятельного приобретения этих изделий все категории инвалидов имеют право получить денежную компенсацию за протезирование в размере, установленном территориальным уполномоченным органом. Размер компенсации может меняться и устанавливается на основании последних проведенных конкурсных процедур закупки аналогичных изделий.

Таким образом, если по какой-либо причине, вам не подходит средство реабилитации, которое вам предлагают бесплатно, вы имеете право самостоятельно приобрести любое изделие, которое соответствует описанию в ИПР и получить полное либо частичное денежное возмещение!

Чтобы облегчить процесс получения компенсации за самостоятельно приобретенное вами техническое средство реабилитации, убедитесь, что в ИПР указано именно то изделие, которое вы собираетесь приобрести и его формулировка соответствует утвержденной классификации. Узнавайте заранее в территориальном уполномоченном органе размер установленной компенсации.

- вании следующих документов:
- Документы, подтверждающие расходы (товарный, кассовый чек) - выдается компанией, устанавливающей протез;
 - Паспорт изделия (если требуется) - выдается компанией, устанавливающей протез;
 - Копия Сертификата соответствия или Регистрационного удостоверения - выдается компанией, устанавливающей протез;
 - Заявление о возмещении расходов по приобретению технического средства (изделия);
 - Паспорт;
 - В случае, если оформляется на ребенка: свидетельство о рождении, паспорт родителя;
 - Справка, подтверждающая инвалидность;
 - Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС);
 - Индивидуальная программа реабилитации (ИПР);
 - Сбережника или реквизиты вашего банковского счета.

Функциональные насадки на протез (насадки на выбор):

- Смарт-часы;
- Насадка для скакалки или фонарика;
- Площадка для конструктора;
- Кухонные насадки;
- Пульт управления дроном;
- Держатель для карандашей или палитры красок;
- Крепление для экшен-камеры, смартфона или плеера;
- Что-то особенное можно изготовить по запросу.

При установке любого детского протеза каждый новый КИБИ-герой может получить подарок - умные часы.

Основные достоинства смарт-часов:

- Вы всегда знаете местоположение вашего ребенка;
- Можете связаться с ним, а он с вами нажатием одной кнопки;
- Посмотреть его дневной маршрут, чтобы узнать где он успел побывать, пока вас не было рядом.
- Указывать границы, за которые ребенку нельзя выходить с уведомлением по СМС;
- Если браслет будет снят с руки, то вам снова придет уведомлением по СМС;
- Установить напоминания для ребенка о разных важных делах и задачах, которые ему нужно выполнить;
- Создать книгу контактов из трех номеров, на которые ребенок может позвонить, нажав одну кнопку.

Мы готовы предоставить любую дополнительную информацию, а также отзывы людей, прошедших протезирование и нашу программу реабилитации.

Мы просим Вашей поддержки и содействия в реализации данного проекта на местном уровне. Мы просим порекомендовать наш проект руководителям городов и районов.

Мы надеемся, что вы откликнитесь на нашу просьбу, примите участие и окажете содействие в реализации предлагаемого социального проекта. Готовы рассмотреть любой формат взаимодействия.

Ответственные контакты:

Игорь Попович.

Тел. моб: +7(963)712-03-40

mailto: info@deti-mira.ru

Сайт производителя: <https://motorica.org/>

Почтовый адрес: 125057, Россия, г. Москва, Фонд «Дети Мира» а/я 47